

## ProfiPolish, Prophylaxepaste RDA 40

### Anwendungsbereich

Prophylaxepaste für die Endpolitur natürlicher Zähne und Füllungen.

### Anwendung

Nach der Zahnsteinentfernung ProfiPolish in ein Dappenglas oder ein vergleichbar geeignetes Behältnis geben. Eine kleine Menge Paste dann mit dem Gummikelch oder der Polierbürste aufnehmen und in das Arbeitsgebiet einbringen. Darauf achten, dass das Winkelstück erst in Gang gesetzt wird, wenn der Polierer die Zahnoberfläche berührt. Mit langsamen Umdrehungen und wenig Druck den Polierer über die Zahnoberfläche und unter den losen Zahnfleischsaum führen. Die Behandlung mit frischer Paste wiederholen, bis alle Zahnoberflächen sorgfältig gereinigt und poliert sind. Danach gründlich ausspülen.

### Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- Reinigung und Politur von Zahnoberflächen bei Verfärbungen oder Plaque
- Natriumfluorid unterstützt die Remineralisierung und beugt Entzündungen des Zahnfleisches vor
- Minz-Geschmack
- RDA 40
- vegan, lactosefrei
- gluten- und phthalatfrei
- fein



### Zusammensetzung

- Amorphes Siliciumdioxid
- Glycerin
- Parabene
- Natriumfluorid (0,1%)
- Aroma- und Farbstoffe

### Haltbarkeit

54 Monate

### Lieferform

REF 481 Tube mit 95 g

### Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse I, Regel 5,

### Zubehör

Kelchbürsten, 4 mm, montiert für Winkelstück

REF 260.21 weiß, mit Naturborsten

REF 260.2N weiß, mit Nylonbesatz, weiß

REF 260.240N blau, mit Nylonbesatz

REF 260.250N pink soft, mit Nylonbesatz

REF 260.260N weiß soft, mit Nylonbesatz



### Hersteller

Alfred Becht GmbH

Carl-Zeiss-Str. 16

D-77656 Offenburg

Tel.: +49 781 60586-0

Fax.: +49 781 605864-40

www.becht-online.de

Prophylaxepolierer, latexfrei

REF 200.1, 200.2, 200.3 zum Aufschrauben

REF 202.1, 202.2, 202.3 zum Aufstecken

REF 204.1, 204.2, 204.3 montiert für Winkelstück

