

Bechtol Premium

Konzentrat

Anwendungsbereich

Hochleistungskonzentrat zur schnellen und wirtschaftlichen Desinfektion und Reinigung von chirurgischen Instrumenten.

Anwendung

Zur Herstellung einer 1%igen Gebrauchslösung werden 990 ml Leitungswasser in eine Wanne gegeben und mit 10 ml Bechtol Premium Konzentrat vermischt (entspricht 980 ml Leitungswasser und 20 ml Konzentrat bei 2% igem Ansatz). Gebrauchte Instrumente werden unmittelbar in die Lösung eingelegt. Vollständige Benetzung und Mindesteinwirkzeiten beachten. Lösung täglich erneuern. Anwendungsbeschränkungen der Instrumentenhersteller beachten.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid in 15 Minuten in 2%iger Gebrauchslösung und in 30 Minuten in 1%iger Gebrauchslösung (EN 13727/13624)
- wirkt tuberkulozid (M.terrae) in 30 Minuten in 3%iger und in 60 Minuten in 1%iger Gebrauchslösung (EN 14348)
- getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand 4/2015) unter hoher organischer Belastung und gelistet bei der VAH
- vollständige Virusinaktivierung (HBV/HCV/HIV/Vaccinia/BVDV/HPV/Adeno/Polio) min 15 Minuten in 3%iger Gebrauchslösung nach EN 14476
- wirksam gegenüber Rota- und Noro-Viren
- wirkt sporizid in 30 Minuten in 3%iger und in 60 Minuten in 1%iger Gebrauchslösung
- ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad in 5 Minuten in 3%iger Gebrauchslösung
- phenol- und aldehydfrei
- pH-Wert: 11,3

Zusammensetzung

100 g Bechtol Premium enthalten:

- 8,0 g Benzalkoniumchlorid
- 4,0 g Dodecyldipropylentriamin

Lieferform

REF 536 Flasche mit 1 Liter Konzentrat

REF 536.5 Kanister mit 5 Liter Konzentrat



Haltbarkeit

30 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIb, Regel 15,
CE Certificate: G1 17 09 49628 010,
TÜV SÜD Product Service GmbH, München

Zubehör

REF 567.5 Dosierpumpe für
5 Liter Kanister

REF 567.51 Ausgießer für
5 und 10 Liter Kanister

REF 630 Fräsator

REF 631 Klein-Fräsator



Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
www.becht-online.de