

Zahnreinigungsbürsten

Anwendungsbereich

Mit Zahnreinigungsbürsten werden unter Einsatz von Prophylaxepaste durch rotierende Bewegungen Verfärbungen und Beläge im Rahmen zahnärztlicher Präventivmaßnahmen von Zahnoberflächen entfernt bzw. poliert. Dadurch werden ästhetisch saubere Zahnoberflächen erzielt.

Anwendung

Zahnreinigungsbürsten werden immer mit einer Prophylaxe-Reinigungspaste verwendet. Nach dem Auftragen der Paste auf die Bürste oder direkt auf den Zahn wird dann das zahnärztliche Winkelstück in rotierende Bewegung versetzt und auf dem zu reinigenden Zahn aufgesetzt. Durch kreisende oder oszillierende Bewegungen wird die Oberfläche mit den Enden der Fasern bearbeitet.

Eigenschaften

Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit der vorgegebenen Umdrehungszahl von 5.000 upm und ohne Druck auf den Zahn oder Füllungsmaterial. Becht-Zahnreinigungsbürsten sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und werden unsteril ausgeliefert.

Haltbarkeit

60 Monate



Lieferform

Kelchbürsten, 4 mm, montiert für Winkelstück:

- REF 260.21** mit Naturborsten
- REF 260.2N** weiß, mit Nylonbesatz
- REF 260.240N** lila mittel, mit Nylonbesatz
- REF 260.260N** weiß soft, mit weichem Ziegenhaar
- REF 260.250N** pink soft, mit Nylonborsten

- REF 206** Flachbürste mit schwarzen Borsten
- REF 207** Spitzbürste mit schwarzen Borsten

Klassifizierung

Medizinprodukt der Klasse IIa, Regel 5, RL 93/42/EW
EG-Zertifikat: G1 17 09 49628 010,
TÜV SÜD Product Service GmbH, München

Zubehör

- REF 210** Mandrel zum Einschrauben zur Montage auf Winkelstück
- REF 480** ProfiGuard RDA 250
- REF 481** ProfiPolish RDA 40
- REF 486** ProphyRepair progressive Prophylaxepaste, End-RDA 34



Hersteller

Alfred Becht GmbH,
Carl-Zeiss-Str. 16,
D-77656 Offenburg,
Tel.: +49 781 60586-0,
Fax.: +49 781 60586-40,
www.becht-online.de