

## Becht XL Wipes alkoholfrei

Vorgetränkte Desinfektionstücher

### Anwendungsbereich

Vorgetränkte Tücher für die Wischdesinfektion und Reinigung alkoholsensibler Oberflächen, Kunst- und Lederbezügen. Alkoholfrei.

### Anwendung

Beutel in ein ausreichend großes Behältnis stellen (z.B. Becht-Spenderbox. REF 531). Unterhalb der Schweißlinie abschneiden. Mit dem ersten Tuch den Deckel und die Abreißvorrichtung desinfizieren. Danach das Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Deckelöffnung ziehen. Zur Desinfektion die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände vollflächig einreiben und die Flüssigkeit einwirken lassen. Nach der vorgegebenen Einwirkzeit mit einem sauberen Tuch nachwischen. Spenderbox nach Entnahme eines Tuches immer sofort verschließen.

### Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und levurozid in 1 Minute (EN 13727/13624)
- **erfolgreich getestet im 4-Felder-Test nach EN 16615**
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren in 1 Minute (EN 14476)
- besonders weiches, fusselfreies und reißfestes Vlies
- ohne Parfüm und Farbstoffe für beste Materialverträglichkeit
- hohes Wiederabgabevermögen der Flüssigkeit auf die zu desinfizierende Fläche
- Tränkflüssigkeit: 1,9 l Bechtosid soft (VAH-gelistet)
- Tuchgröße: 28 x 30 cm
- Gewicht: 50 g/qm



### Zusammensetzung der Tränkflüssigkeit

100 g Lösung enthalten:

- 250 mg Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-Chlorid
- 250 mg Didecyldimethylammonium-Chlorid
- 250 mg C12-14 Alkyl[(ethylphenyl) methyl]dimethyl-Chlorid

### Haltbarkeit

30 Monate

### Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15,  
CE Certificate: G1 17 09 49628 010,  
TÜV SÜD Product Service GmbH, München

### Lieferform

**REF 531.90** Beutel mit 90 Stück Inhalt  
**REF 531** Spenderbox für Becht XL Wipes alkoholfrei

### Hersteller

Alfred Becht GmbH  
Carl-Zeiss-Str. 16  
D-77656 Offenburg  
Tel.: +49 781 60586-0  
Fax.: +49 781 60586-40  
[www.becht-online.de](http://www.becht-online.de)