

Bechtofix plus

Vorgetränkte Desinfektionstücher

Anwendungsbereich

Vorgetränkte Tücher für die Wischdesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, z.B. Behandlungsstühle, Trays, Handstücke in der Zahnarzt- und Fußpflegepraxis.

Anwendung

Desinfektionstücher einzeln entnehmen. Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände vollflächig abreiben und das Präparat einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten. Nicht nachwischen. Dose nach Entnahme eines Tuches sofort wieder verschließen

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und levurozid in 1 Minute unter hoher organischer Belastung (EN 13727/13624)
- **erfolgreich getestet im 4-Felder-Test nach EN 16615**
- wirkt tuberkulozid (M.terrae) in 5 Minuten (EN 14348)
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren in 1 Minute (EN 14476)
- besonders weiches, saugfähiges und reißfestes Vlies
- hohes Wiederabgabevermögen der Flüssigkeit auf die zu desinfizierende Fläche
- mit angenehmem Lemonduft
- Tränkflüssigkeit: Bechtozid plus (VAH-gelistet)
- erfolgreich im Röhmtest auf Plexiglas
- Tuchgröße: 14 x 20 cm



Zusammensetzung der Tränkflüssigkeit

100 g Lösung enthalten:

- 250 mg Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-Chlorid
- 250 mg Didecyldimethylammonium-Chlorid
- 250 mg C12-14 Alkyl[(ethylphenyl) methyl]dimethyl-Chlorid
- 20 g Ethanol
- 9,95 g 1-Propanol

Haltbarkeit

30 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15,
CE Certificate: G1 13 04 49628 007,
TÜV SÜD Product Service GmbH, München

Lieferform

REF 548.100L Spenderdose mit 100 Stück Inhalt
REF 548.100LNF Nachfüllpackung mit 100 Stück Inhalt

Gutachten / Prüfberichte

Gutachten gemäß DGHM:

- Prof. Dr. med. R. Schubert / Frankfurt am Main / 2006
- Prof. Dr. med. H.-P. Werner / Bischofshofen / 2009

Tuberkulozidie (EN 14348):

- Prof. Dr. med. H.-P. Werner / Schwerin / 2015

BVDV-/Vacciniavirus:

- Prof. Dr. Jochen Steinmann / Bremen / 2005

4-Felder-Test (EN 16615):

- Prof. Dr. med. H.-P. Werner / Schwerin / 2015

Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
www.becht-online.de