

Perma Evolution

Anwendungsbereich

Wurzelfüllmaterial auf Epoxidharzbasis für permanente Wurzelfüllungen.

Anwendung

Vor Gebrauch muss die Verschlusskappe von der Doppelkammerspritze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt werden. Eine Mischkanüle wird aufgesetzt, wobei die Feder der Mischkanüle in die Nut der Spritze eingeführt und die Kanüle im Uhrzeigersinn festgedreht wird. Durch das Drücken des Kolbens werden die beiden Pasten in der Mischkanüle im Verhältnis 1:1 zur gebrauchsfertigen Paste vermischt. Die Paste kann mit einem Endo Tip sowie mit Anmischblock und Lentulo / Guttaperchastift appliziert werden. Nach Abschluss der Behandlung muss die Verschlusskappe wieder auf die Spritze aufgedreht und die Mischkanüle verworfen werden.

Eigenschaften

- frei von Iodoform und Paraformaldehyd und somit beste Biokompatibilität
- geeignet für alle orthograden Wurzelfüllungstechniken
- keimtötend
- dimensionsstabil
- hohe Adhäsion am Dentin
- röntgensichtbar
- einfaches Retreatment
- erfüllt die Anforderungen der EN ISO 6876 an zahnärztliche Wurzelkanalfüllungswerkstoffe
- Verarbeitungszeit: 15 Minuten
- vollständige Aushärtung: 24 Stunden



Zusammensetzung

Paste 1 :

4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol-Epichloridinharz, Alkylglycidylether, Bariumsulfat, tri-Calciumphosphat, Diphenylolpropan-di-Glycidylether

Paste 2:

Polyalkoxyalkylamin-Copololymer, 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanmethylamin, Aqua, Bariumsulfat, tri-Calciumphosphat, nanodisperses Siliciumdioxid, Polyhexamethylenbiguanid-Hydrochlorid

Lieferform

REF 555 Eine Doppelkammerspritze mit 5 ml Inhalt, 20 Mischkanülen und 20 Endo Tips

REF 555.0 Nachfüllpackung Doppelkammerspritze mit 5 ml Inhalt, ohne Zubehör

Zubehör

REF 555.1 Refill mit 25 Mischkanülen

REF 555.2 Refill mit 25 Endo-Tips

Haltbarkeit

24 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 8,
CE Certificate: G1 17 09 49628 010,
TÜV SÜD Product Service GmbH, München

Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
www.becht-online.de