

AquaHy Konzentrat

Anwendungsbereich

AquaHy ist ein Konzentrat zur Verwendung in Nasstechnikgeräten in der medizinischen Fußpflegepraxis. AquaHy reduziert die Keimbildung im Wasser. Es hemmt die Bildung eines Biofilms (Veralgung). AquaHy ist geruchsneutral und löst Hautfette nur in geringem Maße.

Anwendung

Nach dem Mischen ist die Sprayflüssigkeit mindestens 3 Monate haltbar. Bei erhöhter Licht- und Temperaturbelastung der Sprayflüssigkeit kann es in seltenen Einzelfällen dazu kommen, dass sich trotz der Verwendung von AquaHy ein Biofilm bildet (glitschiger Film im Tank). In diesem Fall ist die Flüssigkeit nicht weiter zu verwenden und muss nach gründlicher Reinigung von Tank und Spraysystem durch Neue ersetzt werden. Gerät nach Benutzung mit destilliertem Wasser durchspülen.

Mischverhältnis: 5l destilliertes (demineralisiertes) Wasser mit 100 ml AquaHy. 1l destilliertes (demineralisiertes) Wasser mit 20 ml AquaHy Verwenden Sie niemals Leitungswasser! Anwendungskonzentration 1:50.

Eigenschaften

- Keimreduktion innerhalb weniger Minuten
- geruchsneutral
- einfache Anwendung
- wirtschaftlich (Anwendungskonzentration 1:50)

Zusammensetzung

100 g AquaHy enthalten:

- 0,5 g Polymer Hydrochlorid

Lieferform

REF 560 Flasche mit 100 ml Konzentrat

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse I, RL 93/42/EWG, Anhang IX,
Abs. 1.1, Regel 1



Haltbarkeit

60 Monate

Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
www.becht-online.de